

713-093V90



Πολυθρόνα Relaxing Lift



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Μόνο για οικιακή χρήση

Οδηγίες Χρήσης:

- Τοποθετήστε την καρέκλα σταθερά σε επίπεδο δάπεδο.
- Κρατήστε μακριά από ανοιχτές φλόγες.
- Αποφύγετε την υπερφόρτωση της καρέκλας.

Προφυλάξεις πριν τη συναρμολόγηση:

- Προετοιμάστε μια καθαρή και στεγνή περιοχή για συναρμολόγηση.
- Ελέγξτε ότι το προϊόν δεν είναι κατεστραμμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν λείπουν κομμάτια.

Συντήρηση:

- Καθαρίζετε με μαλακό ύφασμα.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καθίσματος.




Συνθήκες Αποθήκευσης:

- Το ύφασμα πρέπει να αποθηκεύεται εντελώς στεγνό, σε καθαρό και ξηρό μέρος για να αποφεύγεται ο κίνδυνος μούχλας.


⚠ Προσοχή στους κινδύνους σύνθλιψης και κοπής κατά τη συναρμολόγηση.

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση ζημιών λόγω κακής εγκατάστασης ή φθοράς.


Εάν το κάθισμα διαθέτει ρυθμιζόμενους μηχανισμούς ύψους με ηλεκτρική υποβοήθηση, μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει αυτά τα εξαρτήματα.

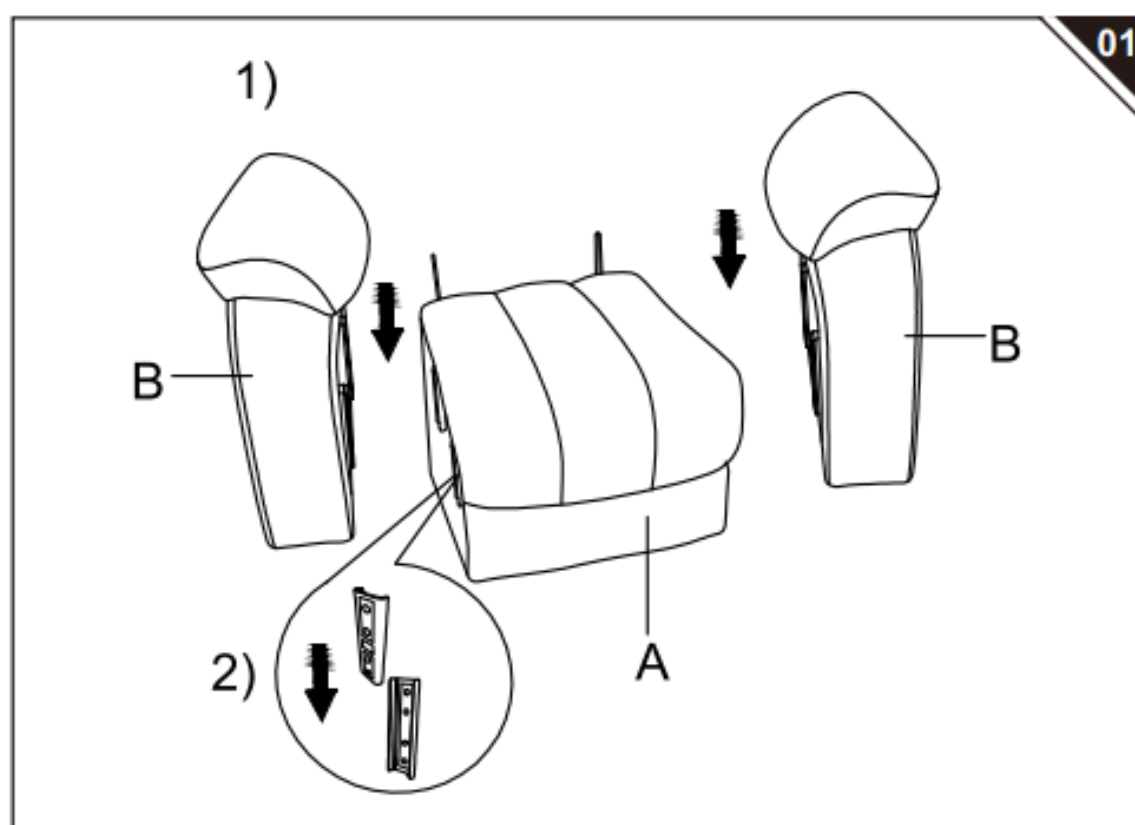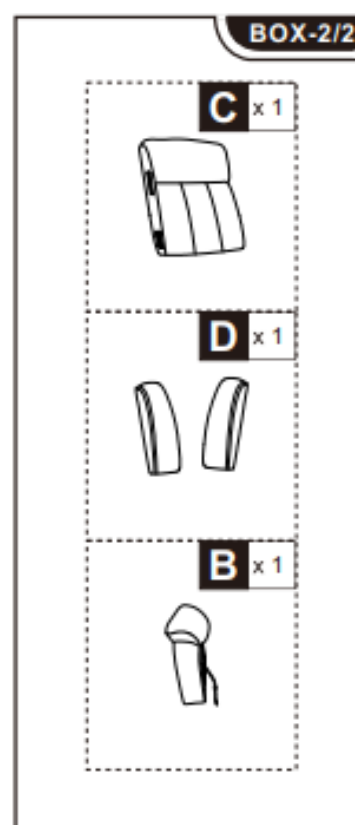
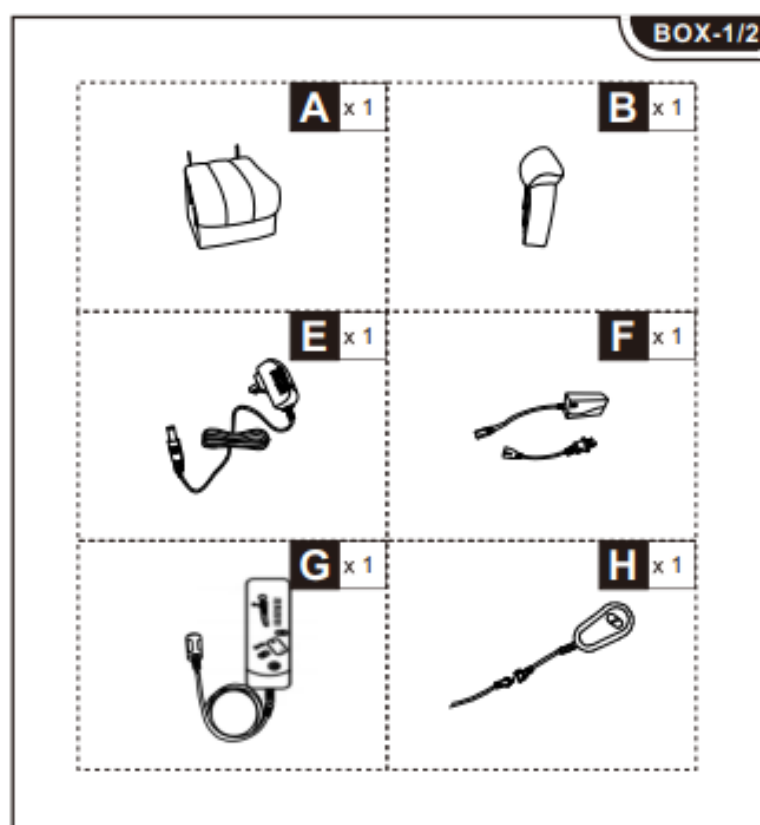



02

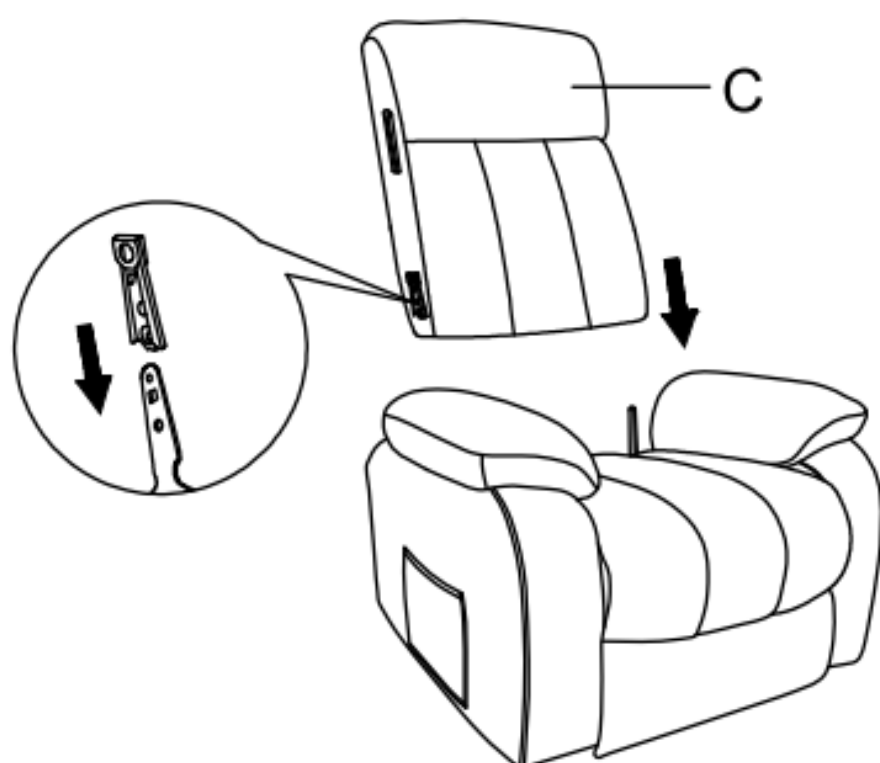

03

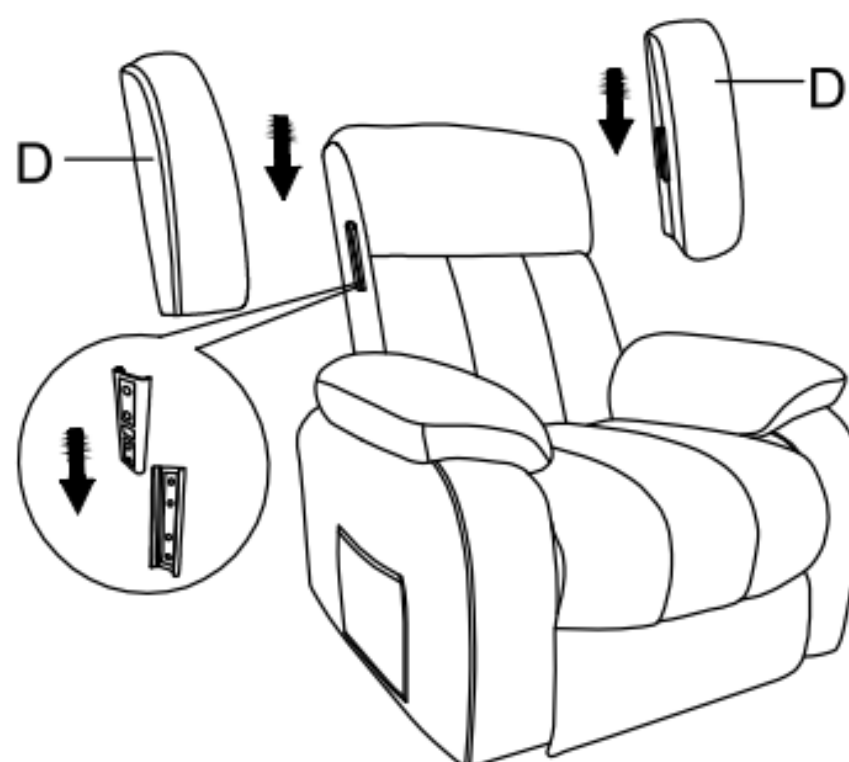

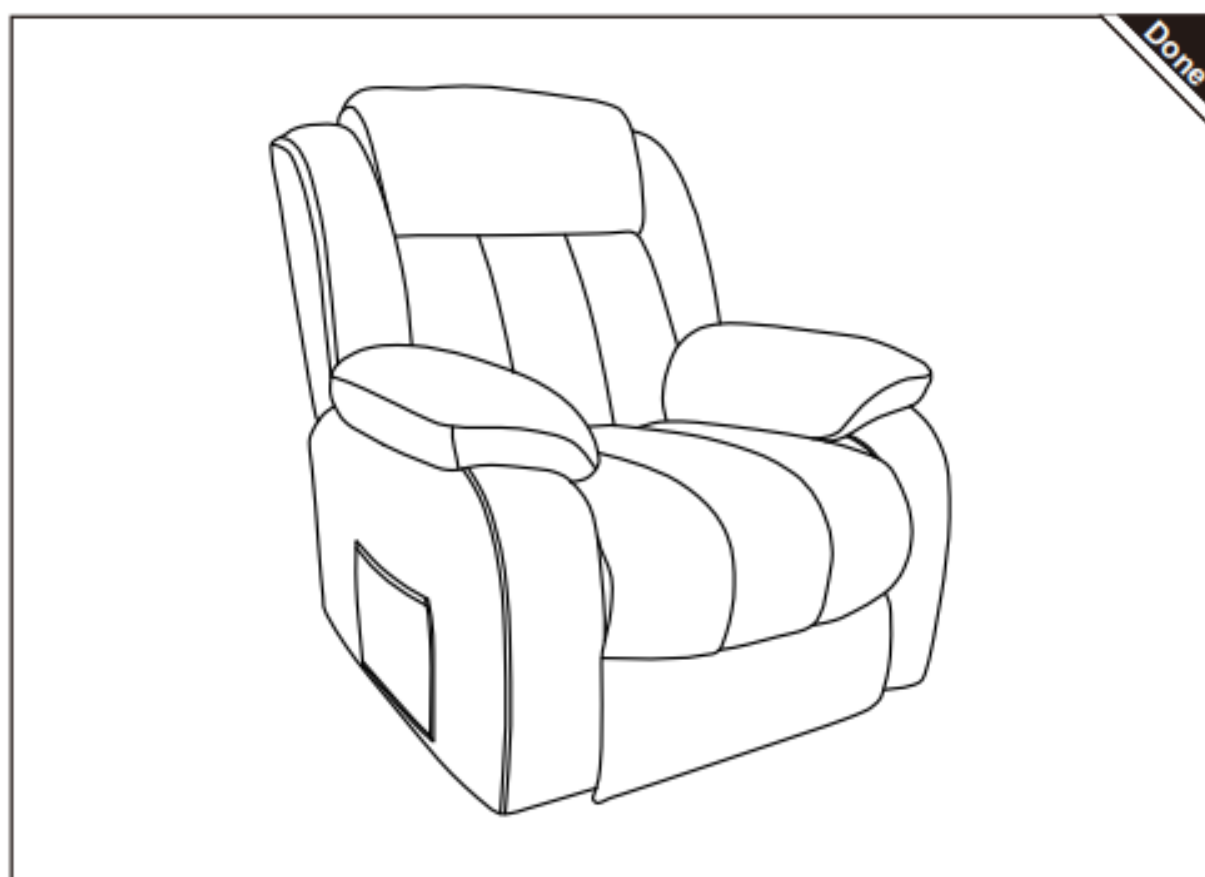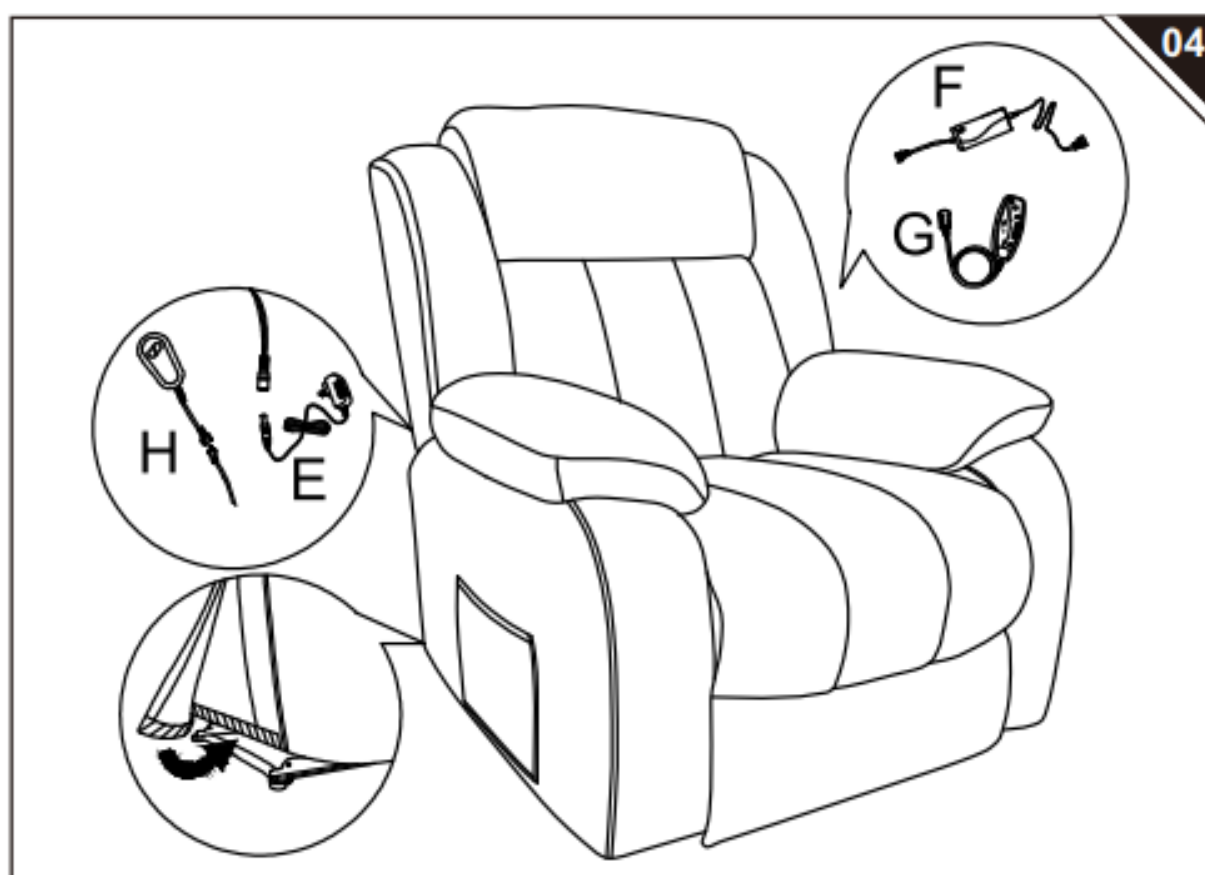

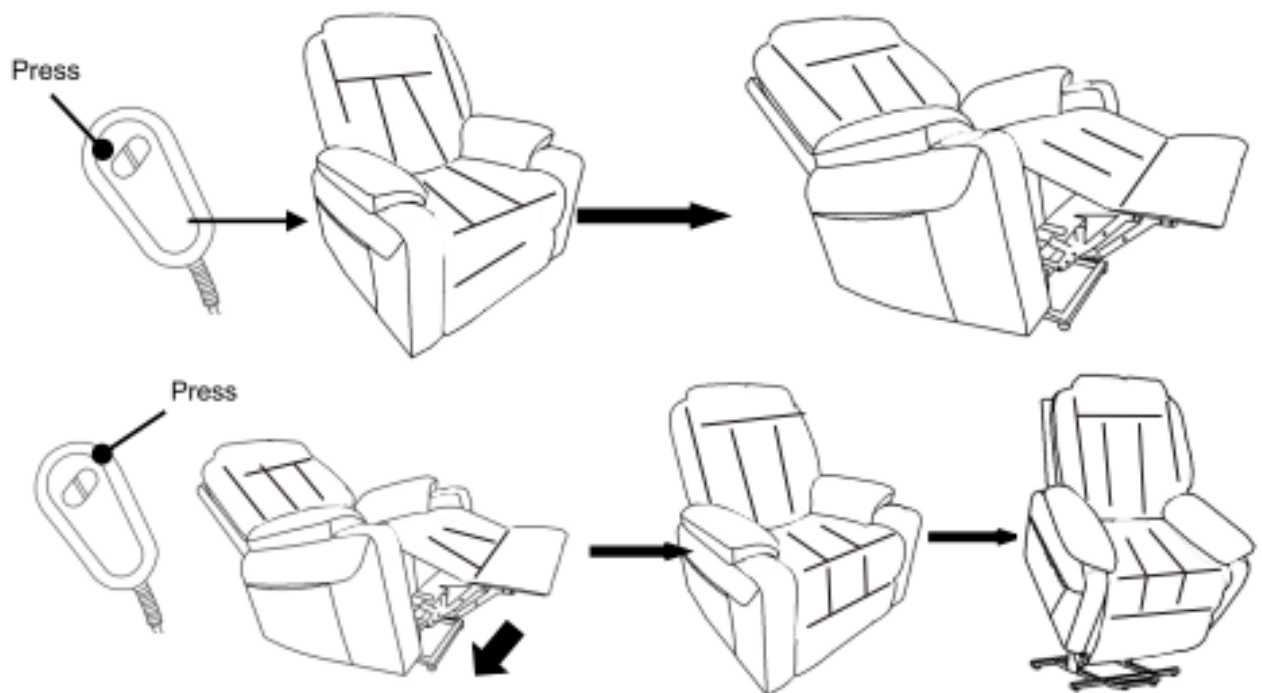

ΜΑΣΑΖ

Παράμετρος	Τιμή
Είσοδος Τάσης (Input Voltage)	100-240 V
Συχνότητα Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Input AC Frequency)	50/60 Hz
Έξοδος Τάσης (Output Voltage)	12 V
Ρεύμα Έξοδου (Output Current)	0.5 A
Ισχύς Έξοδου (Output Power)	6 W
Μέση Απόδοση Ενεργειακής Απόδοσης (Average Active Efficiency)	85 %
Αποδοτικότητα σε χαμηλό φορτίο (10 %) (Efficiency at Low Load (10%))	76.58-72.73 %
Κατανάλωση Ισχύος σε Κατάσταση Αναμονής (No-load Power Consumption)	0.074-0.104 W

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (HELP STATION)


Παράμετρος	Τιμή
Είσοδος Τάσης (Input Voltage)	100-240 V
Συχνότητα Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Input AC Frequency)	50-60 Hz
Έξοδος Τάσης (Output Voltage)	29 V
Ρεύμα Έξοδου (Output Current)	2 A
Ισχύς Έξοδου (Output Power)	58 W
Μέση Απόδοση Ενεργειακής Απόδοσης (Average Active Efficiency)	89 %
Αποδοτικότητα σε χαμηλό φορτίο (10 %) (Efficiency at Low Load (10%))	72.73 %
Κατανάλωση Ισχύος σε Κατάσταση Αναμονής (No-load Power Consumption)	0.104 W

Οδηγίες Χρήσης

1. **Πάνω:** Για να ρυθμίσετε το ύψος της ηλεκτρικής καρέκλας ανύψωσης, η καρέκλα θα ανυψωθεί αφού πατήσετε το κουμπί.
2. **Κάτω:** Για να ρυθμίσετε το ύψος της ηλεκτρικής καρέκλας ανύψωσης, η καρέκλα θα κατέβει αφού πατήσετε το κουμπί.



- Πλάτη / Οσφυϊκή Περιοχή / Μηροί / Πόδια (Back / Lumbar / Thighs / Leg)
- Επιλογή Ζώνης Μασάζ (Massage Zone Selection)
- Χρόνος Μασάζ (Massage Time)
- Επιλογή Λειτουργιών Μασάζ (Massage Modes Selection)
- Ένταση Μασάζ (Massage Intensity)
- Μασάζ ON/OFF (Massage ON/OFF)

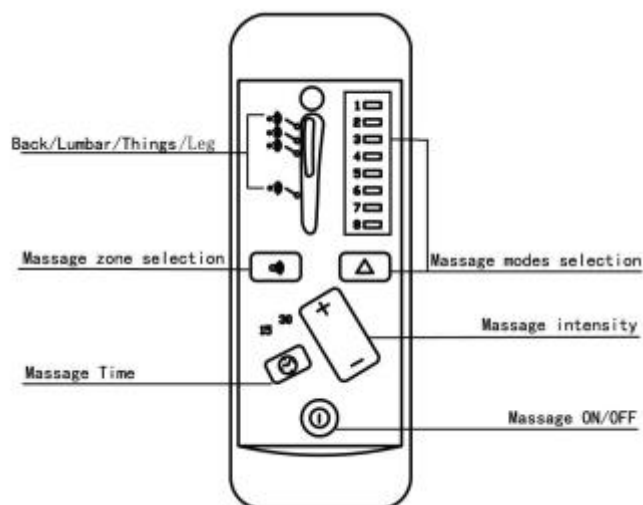

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 8 Κινητήρες Δόνησης
 - 8 Λειτουργίες Μασάζ
 - 5 Ρυθμιζόμενα Επίπεδα Έντασης
 - 4 Ζώνες Μασάζ (μπορούν να λειτουργούν μεμονωμένα)
 - Χρόνος Μασάζ 15-30 λεπτά
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί POWER. Το LED θα ανάψει όταν η συσκευή είναι ενεργή.
2. Ενεργοποιήστε το μασάζ σε κάθε ζώνη πατώντας το κουμπί επιλογής ζώνης μασάζ. Τα LED θα δείξουν ποιες ζώνες είναι ενεργές. Για να απενεργοποιήσετε μια ζώνη, πατήστε ξανά το κουμπί.
3. Για να επιλέξετε τη λειτουργία μασάζ, πατήστε το κουμπί MODE μέχρι να φωτίσει το επιθυμητό LED.
4. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το κουμπί INTENSITY. Το LED για την ΕΛΑΦΡΙΑ (LOW) ή την ΥΨΗΛΗ (HIGH) ένταση θα ανάψει ανάλογα με την επιλογή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διακόψτε τη χρήση αμέσως εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε δυσφορία ή πόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ασφάλειά σας, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά συνεχούς χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 30 λεπτά συνεχώς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΣΑΖΕΡ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον παρεχόμενο αντάπτορα 12V.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Σε περίπτωση επαφής με νερό, αποσυνδέστε αμέσως.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως λαβή για μεταφορά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή τα εξαρτήματα είναι φθαρμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή πνευματική ικανότητα, χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές του σώματος με υψηλή ευαισθησία.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη χρήση για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται ή περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν έχετε οποιοσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την υγεία σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση.
- Τα άτομα με βηματοδότες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μυς που είναι τραυματισμένοι ή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Φυλάξτε τη συσκευή στο κουτί της, σε ξηρό και δροσερό μέρος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε αιχμηρά αντικείμενα ή σε υγρά.
- Για τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν τη χρήση.
- Καθαρίστε με μαλακό πανί και ήπιο καθαριστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά καθαριστικά.