

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CTZXQCKJL8IN4O4KDVO



Πτυσσόμενος Περιπατητήρας

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πρόλογος

Πρώτα απ' όλα, εκφράζουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας προς τους πελάτες που αγόρασαν τον εξοπλισμό μας.

Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πελατών, ώστε να χρησιμοποιούν καλύτερα τον εξοπλισμό.

Ελπίζουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας θα σας αφήσουν μια ευχάριστη εμπειρία.

Προσοχή

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις μεθόδους του παρόντος εγχειριδίου.

Οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από **λανθασμένη χρήση**, κατάχρηση ή άλλες μεθόδους εκτός των προβλεπόμενων δεν καλύπτεται από την εταιρεία.

Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για καμία χρήση πέραν αυτών που αναφέρονται σαφώς στην επίσημη προσφορά εγγύησης.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σε πρόσωπα ή περιουσία που προκύπτει λόγω λανθασμένης χρήσης αυτού του προϊόντος, ή για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες απώλειες εκτός όσων προβλέπονται ρητά.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι **προστατευόμενο πνευματικό έργο**.

Απαγορεύεται χωρίς έγγραφη άδεια η **αντιγραφή, ανατύπωση, μετάφραση, διανομή ή χρήση του περιεχομένου**.

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ευθύνη Κατασκευαστή

Η εταιρεία φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και αξιοπιστία του προϊόντος **μόνο όταν:**

- η συναρμολόγηση, λειτουργία, επιστροφή, βελτίωση και συντήρηση γίνονται από προσωπικό εγκεκριμένο από την εταιρεία,
- χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας,
- ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Εγγύηση

Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι ο εξοπλισμός (εκτός από τα αναλώσιμα μέρη) βρίσκεται σε καλή κατάσταση παραγωγής και υλικών, χωρίς ελαττώματα, για **ένα (1) έτος** από την ημερομηνία αποστολής.

Καμία επιθεώρηση δεν μπορεί να είναι απολύτως τέλεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

1. Εάν οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού φαίνεται χαλαρό, φθαρμένο ή κατεστραμμένο, επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρεία.
2. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και τακτοποιημένο. Ο ακατάστατος χώρος αυξάνει την πιθανότητα ατυχημάτων.
3. Κρατήστε παιδιά και περαστικούς μακριά κατά τη λειτουργία. Η απροσεξία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
4. Χρησιμοποιήστε το προϊόν με συνοδεία ή κατάλληλη επίβλεψη, εφόσον απαιτείται.
5. **Πριν από τη χρήση**, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρως συναρμολογημένα και στερεωμένα, και ολοκληρώστε την πλήρη συναρμολόγηση **σύμφωνα με τις οδηγίες**.
6. Τα μεταλλικά τμήματα πρέπει να πλένονται με νερό και να στεγνώνουν. Εάν υπάρχει φθορά ή γρατζουνιές στην επιφάνεια, η υγρασία μπορεί να προκαλέσει σκουριά.
7. Βεβαιωθείτε ότι ο πίσω τροχός του προϊόντος είναι ασφαλισμένος, ώστε να μην γλιστρά όταν το προϊόν βρίσκεται σε κεκλιμένη επιφάνεια.
8. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός αναδίπλωσης της πλάκας καθίσματος είναι **ασφαλώς κλειδωμένος** κατά τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα Προϊόντος	Rolling Walker
Μοντέλο	FBL-ZT711
Χρώμα	Μπλε / Κόκκινο
Μέγεθος Τροχών	Μπροστινοί 8" / Πίσω 8"
Μέγιστο φορτίο	300 lb

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όπως φαίνεται στην εικόνα: εντοπίστε τα εξαρτήματα και τις βίδες που απαιτούνται για τον κύριο σκελετό και το κάθισμα.



ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.

Όπως φαίνεται στην εικόνα:

Τοποθετήστε τον ίσιο σωλήνα του σκελετού του καθίσματος στον οβάλ σωλήνα του κύριου σκελετού και στερεώστε με βίδες.



Προσοχή: Το πλαστικό τμήμα στο πάνω μέρος του κύριου σωλήνα πρέπει να κοιτάζει προς τα έξω.

Χρησιμοποιήστε τη μακριά βίδα για να ασφαλίσετε το συνδετικό κομμάτι.



2.

Όπως φαίνεται στην εικόνα:

Τοποθετήστε τη σιδερένια ράβδο στήριξης του καθίσματος στον κυκλικό σωλήνα του κύριου σκελετού και ασφαλίστε.



3.

Όπως φαίνεται στην εικόνα:

Τοποθετήστε τον μπροστινό τροχό κάτω από τον πίσω καμπύλο σωλήνα (U-shaped pipe) και ασφαλίστε χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί.



4.

Όπως φαίνεται στην εικόνα:

Τοποθετήστε τον πίσω σωλήνα σε σχήμα U, μαζί με τους εγκατεστημένους τροχούς, μέσα στον κυκλικό σωλήνα του κύριου σκελετού.

Ευθυγραμμίστε με τη θέση των οπών και στερεώστε το με **C-σχήματος κλιπ** (G-shaped card στην εικόνα).



5.

Όπως φαίνεται στην εικόνα:

Τοποθετήστε τον δεξί σωλήνα του μπροστινού υποποδίου μέσα στον οβάλ σωλήνα του κύριου σκελετού, προσέχοντας να είναι προς τη σωστή πλευρά του τροχού.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη χειρολαβή μέσα στον κυκλικό σωλήνα και ασφαλίστε με το πεντάστερο κουμπί.



6.

Όπως φαίνεται στην εικόνα:

Τοποθετήστε τον αριστερό σωλήνα του μπροστινού υποποδίου μέσα στον οβάλ σωλήνα του κύριου σκελετού, προσέχοντας να είναι προς τη σωστή πλευρά του τροχού.

Έπειτα τοποθετήστε τη χειρολαβή στον κυκλικό σωλήνα και ασφαλίστε με το πεντάστερο κουμπί.



7.

Όπως φαίνεται στην εικόνα:

Ευθυγραμμίστε τη βάση στήριξης μπαστουινών με τη θέση του καθίσματος και ασφαλίστε τη στη θέση της.



8.

Όπως φαίνεται στην εικόνα:

Τοποθετήστε τον σωλήνα της πλάτης μέσα στη θήκη τοποθέτησης του κύριου σκελετού, μέχρι να ασφαλίσει και να ακουστεί το κλικ. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.



Πληροφορίες για το προϊόν

1. Σταθερό & Ανθεκτικό – Δεν ανατρέπεται εύκολα

Διαθέτει μπροστινούς τροχούς 8” που δεν εισέρχονται σε λακκούβες, και περιστροφή 360° για εύκολη οδήγηση.

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

2. Ιδανικό για μεταφορά

Με τσέπη με φερμουάρ, ώστε να κρατάτε ασφαλή όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα και να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα.

3. Άριστο After-Sales Service

Κάθε προϊόν υποβάλλεται σε δοκιμή πριν φύγει από το εργοστάσιο.

Υποστήριξη πελατών διαθέσιμη 24/7.

4. Λειτουργία Αυτόματου Φρεναρίσματος και Κάθισμα Βοηθητικής Στήριξης

Το προϊόν διαθέτει λειτουργία αυτόματου φρεναρίσματος όταν ο χρήστης κάθεται.

Όταν ο χρήστης θέλει να ξεκουραστεί, μπορεί να ενεργοποιήσει το φρένο και να καθίσει με ασφάλεια.

5. Τσάντα αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα

Υπάρχει χώρος αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα, ιδανικός για προσωπικά αντικείμενα και καθημερινά αξεσουάρ.